

71 10171 00 00  
Rev. 01/2019



# PhysioClean

SOLUZIONE FISIOLGICA



INDICATO PER  
AEROSOL TERAPIA



0m+



# PhysioClean

SOLUZIONE FISIOLGICA

5ml 25pz./pcs.



## CONSIGLI PER UN CORRETTO LAVAGGIO

### Pulizia del nasino

1. Posizionare il bambino su un fianco
2. Fare uscire qualche goccia nella narice
3. Ripetere l'operazione con l'altra narice
4. Rimuovere il muco con un fazzoletto o con l'aspiratore nasale.

### Pulizia degli occhi

1. Versare alcune gocce di soluzione su una garza sterile
2. Pulire delicatamente ogni palpebra dall'esterno verso l'interno.



INDICATO PER  
AEROSOL TERAPIA



0m+



# PhysioClean

SOLUZIONE FISIOLGICA

5ml 25pz./pcs.



- Per detergere ed idratare naturalmente il nasino dei pi piccoli.
- Preserva la naturale azione protettiva delle mucose nasali.
- L'azione detergente favorisce l'eliminazione del muco in eccesso.
- Un nasino libero facilita la poppata e favorisce una nanna tranquilla.

**Avvertenze:** Per uso esterno. Non iniettabile. Conservare a temperatura ambiente. Non esporre a fonti di luce e di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Composizione: Cloruro di sodio 0.9 g, acqua purificata q.b. a 100 ml. Validità 5 anni.

Senza coloranti, alcol e conservanti.

Leggere attentamente le istruzioni interne prima dell'uso e conservarle per ogni futuro riferimento.

799721 799850 8



LOT

REF 00 010171 000 000

PKOARE S.p.A.  
Via Saldarini, Catelli, 10  
22070 Corno con Simate (CO) - Italy  
Distributo da Artisans S.p.A. - Via Saldarini, Catelli, 1  
22070 Grandate (CO) - Italy  
www.chicco.com - Made in Italy

Numero verde consumatori Italia 800 188 898



0373

STERILE A

